

WhisperReader käyttöohje

WhisperReader ohjelman avulla voit selata lääkemuiistuttimen hälytyksiä ja historiatietoja. Ohjelma on tarkoitettu ainoastaan laitteen selailuun. Sillä ei voi ohjelmoida laitteita.

Asennus

Ladattuasi WhisperReader ohjelman suorita asennusohjelma ja seuraa ohjeita. WhisperReader on asennettava ennen Whisper lääkemuiistuttimen kytkemistä tietokoneeseen.

Käyttö

1. Käynnistä WhisperReader.
2. Kytke Whisper-lääkemuiistutin. Lääkemuiistuttimen hälytykset ja historiatieto näkyvät kalenterissa. Voit selailla tietoja mutta et muutta niitä. Ikkunan oikeassa reunassa näkyy viimeisen lääkemuiistuttimeen ohjelmoidun hälytyksen päivämäärä ja kellon aika.
3. Irrota lääkemuiistutin. Tiedot häviävät kalenterista mutta säilyvät edelleen lääkemuiistuttimessa.
4. Kytke uusi lääkemuiistutin tai poistu ohjelmasta.

