

WhisperReader bruksanvisning

Med hjälp av WhisperReader-programmet kan du bläddra i läkemedelspåminnarens larm och logg. Programmet är endast avsett för att bläddra i apparaten. Du kan inte programmera apparaten med det.

Installation

Kör installationsprogrammet enligt anvisningarna när du har laddat ned WhisperReader. WhisperReader ska installeras innan Whisper-läkemedelspåminnaren ansluts till datorn.

Användning

1. Starta WhisperReader.
2. Anslut Whisper-läkemedelspåminnaren. Läkemedelspåminnarens larm och loginformation syns i kalendern. Du kan bläddra i informationen, men inte ändra den. I skärmens höger kant visas datum och klockslag för det larm som programmerades senast i läkemedelspåminnaren.
3. Koppla från apparaten. Informationen syns inte längre i kalendern men den finns kvar i läkemedelspåminnaren.
4. Anslut en annan läkemedelspåminnare eller lämna programmet.

